




Медиканова
ИМПЛАНТИРУЕМ УВЕРЕННОСТЬ

ООО «Медиканова»
ул. Орджоникидзе 3.
тел. (495)952-0649; (495)729-7980
www.medicanova.org

Скребок костный стоматологический MICROSS

Инструкция по применению

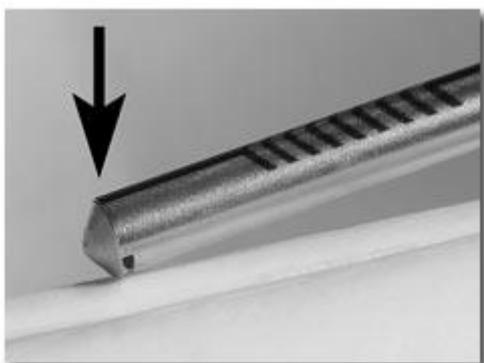


Держать устройство необходимо так, чтобы маркер на поверхности катетера был обращен в сторону врача-хирурга.



Костная ткань собирается посредством надавливания внешнего интерфейса инструмента на костную поверхность и извлечением его назад.



Кость может собираться как с плоских поверхностей, так и из полостей (выемок). Угол работы варьируется от 5° до 50°.

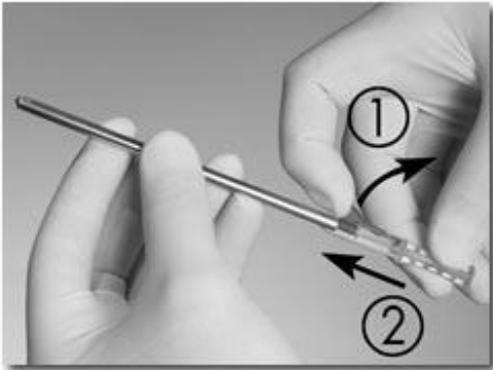

Изменяя угол работы и давление на инструмент, можно изменять количество и консистенцию собираемой кости



Костный скребок Micros может вмещать объем до 0,25 см³.



Чтобы достать собранную кость, необходимо положить инструмент в стерильную чашу (емкость), затем освободить рычаг и плавно двигать устройство назад до полного открытия. Используйте только стерильные инструменты для извлечения аутогенного костного материала из отсека.



Для того чтобы собрать больше костной ткани, нужно привести рукоятку в исходное положение и сцепить рычаг.